



URGENTNÍ: DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - FSCA#10-11

Komerční výrobku	název	Panocell[®]-10, Katalogové číslo: 0003032 šarže: 33142, Exp: 2011-10-21
---------------------	-------	---

20.9.2011

Upozornění pro vedoucí krevních bank nebo laboratoří:

Detailní popis problému: Důležité upozornění týkající se **Panocell[®]-10, Kat.číslo 0003032**
Lot: 33142, Exp: 2011-10-21

Popis

Podle našich záznamů jsme zjistili, že jste obdrželi Panocell-10, šarže 33142. Následující antigeny jsou v Master listu u krvinek 5 (dárce E841) nesprávně zapsány jako negativní: I, Ge, Tj^a, Vel, Yt^a, Di^b, a U. Krvinka 5 je pozitivní pro antigeny I, Ge, Tj^a, Vel, Yt^a, Di^b, a U .

Tato oprava nemá vliv na další používání tohoto výrobku.

Doporučení pro příslušná opatření uživatele

Rádi bychom vás požádali o výměnu Master listu, který je součástí balení Panocell 10 šarže 33142 za opravenou, přiloženou kopii, která je součástí tohoto oznámení. Pro rozlišení, výrobce označil u správného Master listu na druhé stránce Dodatečné otypování označením "A" umístěné na horním levém rohu.

Budete-li mít jakýkoliv dotaz, prosím, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 732 865 872 nebo 272 766 361 či e-mailem: aprpraha@apr.cz

Omlouváme se za nepříjemnosti s tímto problémem spojené.

Prosíme o vyplnění Potvrzení tohoto oznámení a odeslání podepsané kopie zpět na naši e-mailovou adresu: aprpraha@apr.cz a nebo zasláním na faxové číslo: 272 766 361.

S pozdravem

Helena Košťálková
APR s.r.o.
tel.: 732 865 872
e-mail: kostalkova@apr.cz



Potvrzení:

Potvrzuji, že jsme byli oboznámeni s problémem týkající se upozornění Panocell®-10 , Kat. číslo 0003032 Lot: 33142, Exp: 2011-10-21
Jméno:
Pozice:
Pracoviště:
Město/Stát
Telefon:
Fax: