

19. prosince 2012

Bezpečnostní varování a nápravné opatření

ADRESOVÁNO:	<p>Veškerému lékařskému a ošetřujícímu personálu na všech nemocničních odděleních, kde se používá ventilátor HAMILTON-T1, a jejich servisním technikům.</p> <p>Všem distributorům ventilátorů HAMILTON-T1 a jejich servisním technikům.</p>
NÁZEV VÝROBKU:	HAMILTON-T1
PLÁNOVANÉ POUŽITÍ:	<p>Plicní ventilátor HAMILTON-T1 je navržen pro přetlakovou ventilaci dospělých a dětských pacientů.</p> <p>Oblasti plánovaného použití:</p> <ul style="list-style-type: none">· Jednotka intenzivní péče a pooperační oddělení.· Oddělení pohotovosti a poskytování první pomoci.· Při převozu v rámci nemocnice a mimo nemocnici.· Při převozu vozidlem, letounem nebo vrtulníkem záchranné služby.
MODELY, KTERÝCH SE TO TÝKÁ:	HAMILTON-T1 se softwarem verze 1.1.2 a nižší
VÝROBNÍ ČÍSLA:	Všechny ventilátory HAMILTON-T1
VÝROBCE:	HAMILTON MEDICAL AG Via Crusch 8 CH-7402 Bonaduz Švýcarsko
KONTAKT:	HAMILTON MEDICAL AG Technical Support Via Crusch 8 CH-7402 Bonaduz Švýcarsko Tel. +41 81 6606010 Fax +41 81 6606020 e-mail: techsupport@hamilton-medical.ch
DŮVOD PRO BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ U ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU:	Neočekávaně vysoká vnitřní spotřeba kyslíku u ventilátorů HAMILTON-T1 v průběhu ventilace malých dětských pacientů.
HODNOCENÍ SITUACE:	Neočekávaně vysoká vnitřní spotřeba kyslíku u transportních ventilátorů HAMILTON-T1 může vést k nesprávnému výpočtu množství kyslíku, který je zapotřebí při dlouhodobějším použití s omezenou zásobou kyslíku.

Potenciální riziko: Pokud při převozu dojde k vyčerpání zásoby kyslíku, může být ohrožen život pacienta.

Potenciální riziko hrozí v situacích, kdy je pro pacienta k dispozici pouze omezené množství kyslíku (např. při použití lahví se stlačeným kyslíkem) a ventilace pacienta probíhá při vyšší koncentraci kyslíku.

ZÁKLADNÍ PŘÍČINA:

V současnosti používané materiály neinformují dostatečně o vnitřní spotřebě kyslíku u ventilátorů.

V závislosti na nastavení ventilátoru a na velikosti odporu plic pacienta může být vnitřní spotřeba plynu u ventilátoru HAMILTON-T1 vyšší, než jaká by se dala očekávat. Kromě spotřeby kyslíku pro ventilaci pacienta je tedy nutné věnovat pozornost také vnitřní spotřebě kyslíku, zvláště pokud je zásoba kyslíku omezená.

NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ:

Bezprostřední úkony obsluhy:

Před převozem vypočítejte potřebné množství kyslíku podle následujícího vzorce:

Celková spotřeba O₂ u malých pacientů (výška < 70 cm, ideální tělesná hmotnost (IBW) < 8 kg) v litrech za minutu:

$$\text{Spotřeba O}_2 = (\text{MinVol} + \text{Flow Trigger}) \times 4 \times (\text{FiO}_2 - 20,9) / 79,1$$

Celková spotřeba O₂ u větších pacientů (výška > 70 cm, ideální tělesná hmotnost (IBW) > 8 kg) v litrech za minutu:

$$\text{Spotřeba O}_2 = (\text{MinVol} + \text{Flow Trigger}) \times 1,5 \times (\text{FiO}_2 - 20,9) / 79,1$$

Příklad:

Výška pacienta:	60 cm
Minutový objem pacienta (MinVol):	2 l/min
Nastavení spouštění průtokem (Flow Trigger):	1 l/min
Nastavení FiO ₂ (%):	60
Plánovaná doba převozu:	240 minut (4 hodiny)

Vypočet celkové spotřeby kyslíku během plánovaného převozu:

$$\begin{aligned} &\text{Spotřeba kyslíku za minutu} \\ &(2 \text{ l/min} + 1 \text{ l/min}) \times 4 \times (60 - 20,9) / 79,1 = 5,93 \text{ l/min} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Spotřeba kyslíku za 240 minut} \\ &5,93 \text{ l/min} \times 240 \text{ min} = 1423 \text{ litrů} \end{aligned}$$

Celková spotřeba kyslíku během plánovaného převozu 1423 litrů.

Postup u distributorů:

Neprodleně distribuovat toto bezpečnostní varování všem, kdo s ventilátorem HAMILTON-T1 pracují.

- Oddělení pohotovosti a poskytování první pomoci.
- Při převozu v rámci nemocnice a mimo nemocnici.
- Při převozu vozidlem, letounem nebo vrtulníkem záchranné služby.

Aktualizovat materiály a software ventilátoru HAMILTON-T1 neprodleně, jakmile budou nové verze k dispozici.

Postup u výrobce:

Přepracovat a aktualizovat materiály k ventilátorům HAMILTON-T1 (např. provozní příručku).

Vyvinout a distribuovat aktualizovaný software s optimalizovaným sledováním vnitřní a celkové spotřeby kyslíku.

Vážíme si vaší podpory v této záležitosti a upřímně se omlouváme za všechny nepříjemnosti, které by vám mohlo toto nápravné opatření způsobit. Domníváme se, že uvedené opatření je nezbytné pro zajištění toho, aby naši zákazníci obdrželi pouze bezpečné a náležitě fungující výrobky té nejvyšší kvality.

Curdin Danuser
Vicepresident QA & RA
HAMILTON MEDICAL AG

Tyto pokyny prosím připojte k návodu k obsluze přístroje HAMILTON-T1.