

Postup před čištěním vašeho TJF-Q180

TJF-Q180V disponuje množstvím vlastností, které umožňují snazší opětovné používání. Tato rychlá referenční příručka poskytuje přehled hlavních zdokonalení postupu před čištěním.

1 Distální konec endoskopu:

Distální kryt TJFQ180V je pevný, a proto se před čištěním předem nesnímá.


Díky utěsnění lanka A-můstku TJF-Q180V není nutno kanálek pro lanko proplachovat.



2 Během ručního čištění:


Použijte jeden z doporučených kartáčků k vyčištění přední a zadní strany A-můstku.

Kartáček MAJ-1888 lze použít u silného znečištění A-můstku. Díky utěsnění lanka A-můstku TJF-Q180V není nutno kanálek pro lanko proplachovat.

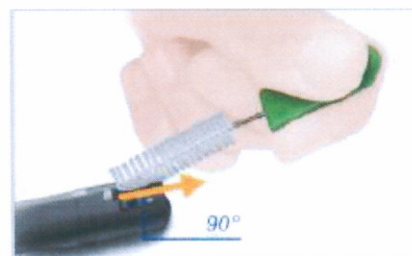

3 Před automatizovaným čištěním:

Nastavte A-můstek do úhlu 45° než umístíte endoskop do automatického dezinfektoru, aby bylo umožněno čištění a dezinfekce obou stran A-můstku.

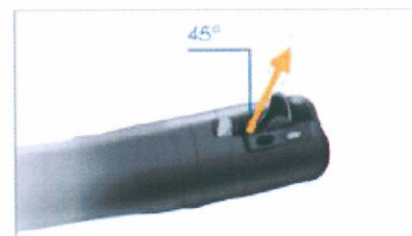

Tento list slouží jen pro rychlé nahlédnutí. Podrobné instrukce pro čištění naleznete v manuálu pro používání TJF-Q180V.

Specifikace, design a příslušenství mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění či závazku ze strany výrobce.