


Návod k přestavbě pružného ramena

Ondal AC Swing na vyšetřovacím svítidle ML 301

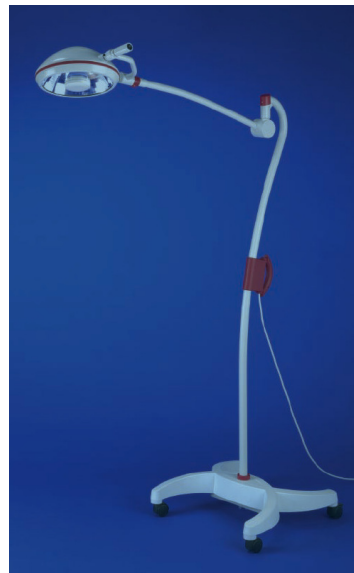


Náš dodavatel Ondal Medical Systems GmbH nás informoval, že na pružném ramenu Ondal AC Swing může dojít k únavovému prasknutí plastového kloubu.


Z tohoto důvodu je nutno pružné rameno preventivně vyměnit.

Identifikace starého pružného ramena s plastovým kloubem ve srovnání s novým pružným ramenem s kloubem kovovým.

Pružné rameno Ondal AC Swing s plastovými kloubem má ohnutou trubku.

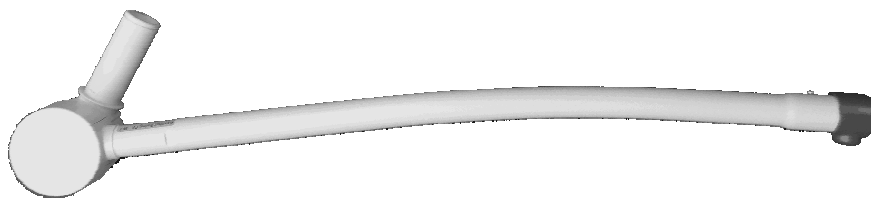

Pružné rameno Ondal AC Swing s kovovým kloubem má rovnou trubku.

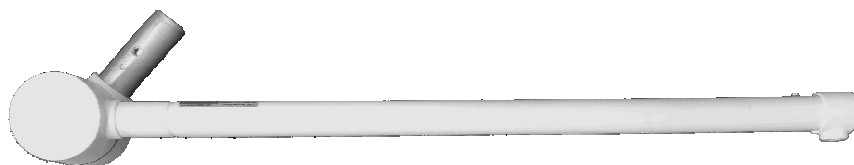

U všech vyšetřovacích svítidel ML 301 s ohnutou trubkou na pružném ramenu je nutné vyměnit toto pružné rameno za pružné rameno s rovnou trubkou.

Objednací čísla nových pružných ramen:

Pro vyobrazené mobilní svítidlo ML 301:

Objednací č. Martin: **08-693-23-04** akční pružné rameno se stativem Swing ML 301

Pro vyobrazené stropní svítidlo ML 301 a nástěnné svítidlo:

Objednací č. Martin: **08-693-22-04** akční pružné rameno, stropní-nástěnné Swing ML 301

Obě pružná ramena obdržíte za akční cenu 140,- € za kus netto plus platná DPH.

Tato cena se v zemích mimo EU může s ohledem na celní poplatky lišit.

Pokyny pro přestavbu:

Pro přestavbu slouží jako pomocný dokument 5 jazyčný servisní návod ML 301 s objednacím číslem 90-735-58-22, který si můžete bezplatně objednat s odpovídajícím pružným ramenem.

Při přestavbě musíte dodržovat bezpečnostní pokyny ze servisního návodu ML 301.

Po opravě je nutné znovu zkontrolovat všechny funkce, než připravíte systém opět k provozu.

Navíc je třeba provést bezpečnostně technickou kontrolu a zdokumentovat její výsledky.

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Ludwigstaler Straße 132 · D-78532 Tuttlingen

Postfach 60 · D-78501 Tuttlingen/Německo

Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193

info@klsmartin.com · www.klsmartin.com