



I.T.A. - Intertact s.r.o.
K Horkám 23
Praha 10 102 00
Czech Republic
Tel. +420 224 810 196
Fax +420 222 314 055
ita@ita-intertact.com
www.ita-intertact.com



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Likvidace produktů

Únor 2013

Název produktu	Kat. číslo	Jednotka	Číslo šarže	Datum expirace
BBL™ Crystal™ Enteric/Nonfermenter ID Kit	245000	Balení 24 kusů	2086315	20. února 2013
			2101435	20. února 2013

Vážení uživatelé identifikačního systému BBL Crystal Identification System, výrobce Becton, Dickinson and Company, USA, rádi bychom Vás informovali o možnosti nesprávného vyhodnocování identifikací mikroorganismů pomocí kitu BBL Crystal E/NF, katalog.č.: 245000, číslo šarže 2086315.

Díky prozkoumání reklamací ze strany zákazníků byla výrobcem Becton, Dickinson and Company, USA zjištěna záměna pozic s reagenty citrát (CIT) a kyselina malonová (MLO) u výše uvedených produktů.

Toto může vést k neidentifikaci nebo identifikaci vzorku s více možnostmi.

- Je-li oznámena neidentifikace, neexistuje žádné potenciální nebezpečí, neboť uživatel je nucen použít pro identifikaci vzorku jiných identifikačních metod. V případě vícenásobné identifikace je uživatel vyzván k provedení testu pro diferenciaci uvedených mikroorganismů.
- Dojde-li k chybné identifikaci, může nastat potenciální nebezpečí. V tomto případě by mohla být antimikrobiální léčba založena na chybné identifikaci mikroorganismu s následným stanovením neúčinného léku. V případě chybné identifikace salmonely ze stolice by nebyl předepsán žádný lék.

Dle našich záznamů byly na Vaše pracoviště dodány produkty uvedených šarží.

Prosíme Vás o okamžité zastavení práce s těmito produkty a likvidaci zbývajících zásob uvedených šarží. Zlikvidované zboží Vám bude nahrazeno.

Prosím o šíření této informace mezi kolegy, kterých se toto upozornění týká.

V případě jakýchkoliv dotazů a pro realizaci náhrady zboží nás kontaktujte: Ing. Naďa Strouhalová, tel.: 602 242 890, e-mail: strouhalova@ita-intertact.com.

Pro účely regulace vyplňte, prosím, přiložený formulář pro potvrzení obdržení tohoto oznámení a odešlete zpět mailem na adresu ita@ita-intertact.com nebo faxem na číslo: 222 314 055.

Pro Vaši informaci uvádíme, že toto oznámení bylo zasláno také na pracoviště SÚKL.



Přijměte, prosím, naši omluvu za možné nepříjemnosti.
Děkujeme Vám za Vaši stálou podporu.

V případě jakýchkoliv potřeb nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem
Ing. Naďa Strouhalová
Product / Sales Manager

I.T.A.-Intertact s.r.o.
Revoluční 24
110 00 Praha 1

provozovna:
K Horkám 23, 102 00 Praha 10
tel.: +420 222 314 074
fax: +420 222 314 055
mobil: +420 602 242 890
email: strouhalova@ita-intertact.com
www.ita-intertact.com



I.T.A. - Intertact s.r.o.
 K Horkám 23
 Praha 10 102 00
 Czech Republic
 Tel. +420 224 810 196
 Fax +420 222 314 055
 ita@ita-intertact.com
 www.ita-intertact.com



PROSÍM, ZAŠLETE VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZPĚT JAKO POTVRZENÍ O PŘIJETÍ ZASLANÉ INFORMACE.

Subjekt:

Adresa:

PRODUCT CONCERNED AND STATUS, AS APPROPRIATE

Název produktu	Katalogové číslo	Číslo šarže	Status	Množství
BBL™ Crystal™ Enteric/Nonfermenter ID Kit	245000	2086315	<input type="checkbox"/> Obdrženo	
			<input type="checkbox"/> Použito	
			<input type="checkbox"/> Zlikvidováno	
		2101435	<input type="checkbox"/> Obdrženo	
			<input type="checkbox"/> Použito	
			<input type="checkbox"/> Zlikvidováno	

Tímto dokumentem já _____,
 jméno

potvrzuji, že jsem obdržel výše uvedené upozornění od výrobce Becton, Dickinson and Company, USA, resp. od dodavatele I.T.A.-Intertact, s.r.o. týkající se výše uvedených produktů a jsem informován o doporučeném postupu.

Datum

Podpis