

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Obchodní název:	Nabíjecí stanice Medela
Kód výrobku:	REF 079.0037 (Typ 200.2233)
Týká se:	Nedodržení pokynů k čištění
Druh činnosti:	Informace pro obchodní partnery a uživatele ohledně řádného čištění nabíjecích stanic

Ve čtvrtek 14. února 2013

Medela si dovoluje upozornit, že ponoření nabíjecí stanice Thopaz do tekutého / čistícího / dezinfekčního prostředku může způsobit její zkrat při příštím zapojení do sítě. V několika málo případech to vedlo k vytvoření spálených míst na vnějším povrchu nabíjecí stanice. Zdravotní personál ani pacient či jiné osoby podle získaných informací přitom neutrpěli žádnou újmu.



Podle revidovaného návodu k použití je nabíjecí stanice elektrickým zařízením a lze ji čistit a dezinfikovat pouze otíráním vlhkým hadříkem.

Všechny výrobky dodané v období od ledna 2008 do ledna 2013 jsou považovány za výrobky, jichž se týká toto bezpečnostní upozornění v případě, že nebudou dodrženy pokyny k čištění. Tento problém se netýká žádných jiných výrobků společnosti Medela.

V rámci okamžitého nápravného opatření bude Medela kontaktovat všechny obchodní partnery a uživatele, aby jim poskytla revidované pokyny k čištění a dezinfekci, a v případě potřeby zabránila personálu používat na zařízení čistící prostředky a dezinfekci.

Pokud potřebujete další informace o výše uvedené záležitosti, kontaktujte prosím společnost Medela Switzerland (vigilance@medela.ch).

V Baaru, Švýcarsko, 14. února, 2013

Marcel Felber
President
Medela AG

Markus Bütler
Vice-President Quality Management