

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

29. 4. 2013

**Předejte prosím toto sdělení všem uživatelům a zaměstnancům, kteří pracují s ventilátory SERVO-i nebo provádějí jejich servis.**

**Toto bezpečnostní upozornění nahrazuje bezpečnostní upozornění uveřejněné 11. 3. 2013.**

**Předmět:** Bateriové články pro ventilátorové systémy MAQUET SERVO-i  
**Dotčené výrobky:** SERVO-I bateriové články  
**Číslo součástky:** 6487180  
**Data výroby:** 1005-1243 (1. 2. 2010 – 25. 10. 2012)


### Věc:

Některé bateriové články s kódem data výroby mezi 1005 a 1243 (1. 2. 2010 – 25. 10. 2012), které jsou často dobíjeny/vybíjeny, tj. používány pro transport, mají kratší než očekávanou dobu výdrže. Pokud přístroj spustí alarm/varovný signál týkající se baterie a bateriový článek je nadále nabíjen/vybíjen, může to vést ke kratší než očekávané výdrži baterie. Nejsou hlášeny žádné újmy na zdraví spojené s tímto problémem.

### Opatření, která musí provést uživatelé SERVO-i:

1. Zkontrolujte kódy data výroby všech baterií nainstalovaných ve všech přístrojích SERVO-i. Každý přístroj SERVO-i by měl být vybaven přinejmenším dvěma nebo více bateriovými články. Máte-li ve svém přístroji SERVO-i jeden nebo více bateriových článků s kódy data výroby mezi čísly 1005 a 1243 včetně, můžete kontaktovat svého lokálního zástupce společnosti MAQUET s požadavkem na dodání jednoho dodatečného bateriového článku pro přístroj SERVO-i zdarma. Náhrada stávajícího nebo přidání nového bateriového článku do přístroje SERVO-i zajistí dodatečné jistění v případě nepravděpodobného předčasného vybití bateriového článku.
2. Před použitím a transportem zjistěte, které bateriové články v přístroji SERVO-i vyslali signál „vyměňte baterii“ a okamžitě je nahraďte jinými.

Signál „vyměňte baterii“ se zobrazuje na příslušném displeji uživatelského rozhraní.

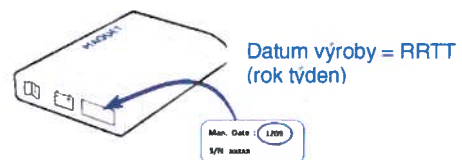

Bateriové články s kódy data výroby 1005-1243, které vysílají signál „vyměňte baterii“ před skončením své životnosti, budou zdarma nahrazeny. Kontaktujte prosím svého místního zástupce společnosti MAQUET, se kterým se domluvíte na výměně.

3. V případě signálu „Nízké napětí“, zapojte ventilátor do síťového napájení nebo přidejte další plně nabitě bateriové články.
4. **Zajistěte**, že v přístroji budou vždy nejméně dva plně nabitě bateriové články, a že bude u ventilátoru dostupné resuscitační zařízení, jak je uvedeno v Uživatelském manuálu. Připomínáme, že do ventilátoru SERVO-i lze nainstalovat až šest bateriových článků.

### Dodatečné informace:

- Informace týkající se signálu alarmu, požadavků na transport a baterií jsou k dispozici v Uživatelském manuálu k přístroji SERVO-i, Část 1 „Úvod“ a 3 „Napájení“

- Mějte na zřeteli, že použití pouze jednoho bateriového článku k napájení SERVO-i je v rozporu s Uživatelským manuálem. K zajištění dostatečného jistění musí být instalovány dva plně nabitě bateriové články současně.
- V případě úplného výpadku elektrického napětí, přístroj bude vydávat hlasitý zvukový signál po dobu nejméně dvou minut a ventilátor bude uveden do stavu „bezpečné ventilace“.
- Společnost MAQUET ukončila výrobu potenciálně dotčených bateriových článků. Nicméně uživatelé mohou nadále bezpečně užívat bateriové články s výše uvedenými kódy data výroby, pokud dodrží instrukce uvedené v tomto bezpečnostním upozornění a v Uživatelském manuálu.
- Ventilátor SERVO-i by neměl být užíván k transportu mezi nemocnicemi bez písemné „Dohody o transportu mezi nemocnicemi“ se společností MAQUET a bez instalace „Sady pro transport mezi nemocnicemi pro SERVO-i“.
- Vezměte prosím na vědomí, že u 99% bateriových článků s výše uvedenými kódy výroby se očekává, že budou fungovat v pořádku a budou plně využitelné po celou dobu životnosti baterie.

Společnost MAQUET velmi oceňuje vaše pochopení a lituje všech nepříjemností, které tato záležitost způsobila. V případě jakýchkoli dotazů nebo pro další informace prosím kontaktujte svého místního zástupce společnosti MAQUET.

S pozdravem



Mgr. Jiří Lacina, MBA  
Managing Director

MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH - o.s.  
Na Strži 65/1702  
CZ-140 00 Praha 4, Czech Republic  
Phone: +420 261 142 520  
Fax: +420 261 142 540  
Mobile: +420 731 991 528  
[katerina.velfelova@maquet.com](mailto:katerina.velfelova@maquet.com)  
<http://www.maquet.com>