



DAL 1948: ESPERIENZA
E RINNOVAMENTO

Předmět: Bezpečnostní oznámení VRC 26/12

Vážený zákazníku,

v návaznosti na událost, k níž došlo u sterilizačního přístroje společnosti FARO, modelu SK07, potřebujeme zabezpečit předběžnou opatrnost tím, že vás informujeme o tomto tématu.

Událost představovalo zlomení šroubu závěsu dveří autoklávu. Porucha vedla k náhlému otevření levého boku dveří autoklávu s únikem páry z jednotky.

Díky svému bezpečnostnímu systému zůstaly dveře po poruše nadále uzamčením spojené s konstrukcí autoklávu.

Porucha je způsobena jevem zvaným "korozní praskání pod napětím", který je vyvolán **současným** výskytem následujících faktorů:

A. napětí v nerezovém šroubu vyšší, než to určené společností FARO pro úvodní utažení (45 Nm)

B. Přítomnost látek agresivních vůči nerezové oceli (t.j. chlóru).

Některé příklady činností, jež by mohly vést k poruše, jsou uvedeny dále:

- Činnost údržby na seřizování dveří nebo okénka autoklávu. Tato činnost by mohla změnit původní moment utažení šroubu a zvětšit jej nad určenou hodnotu (45 Nm)
- mytí nebo čištění komory autoklávu bělidlem nebo kyselinou chlorovodíkovou, nebo jinými, látkami obsahujícími chlór (činnost nepovolená v uživatelském návodu).

Zařízení, jichž se toto může potenciálně týkat, jsou sterilizátory s následujícími vrobními čísly:

- 11ST009000
- 12ST009000
- 12ST009001
- 12ST009002



DAL 1948: ESPERIENZA
E RINNOVAMENTO

Máte-li podezření, že jedna či obě výše zmíněné činnosti mohly nastat u vašeho zařízení SK07, kontaktujte prosím e-mailovou adresu:

SK07@faro.it

s uvedením:

- vaší adresy
- S / N zařízení
- datem instalace
- typicky prováděného čistícího postupu
- prováděné údržby (zvláště takové, která zahrnuje dveře)
- počtu cyklů stroje
- typicky prováděného sterilizačního cyklu.

Budete kontaktován, aby se určilo, jak se zařízením zacházet.

Vraťte prosím příložené potvrzení o příjmu vámi podepsané na číslo faxu +39 039 6878515 nebo na emailovou adresu SK07@faro.it.

S pozdravem,

C. Cesari

Direttore generale



DAL 1948: ESPERIENZA
E RINNOVAMENTO

Potvrzení o příjmu

JMÉNO _____
SPOLEČNOST _____
ADRESA _____

Vážení pánové ze společnosti Faro SpA,

Tímto potvrzují příjem následujících dokumentů:

1. Bezpečnostní oznámení VRC 26_2012

[Datum]

[Podpis příjemce]

Vraťte prosím tuto stranu řádně podepsanou na číslo faxu +39 039 6878515 nebo na emailovou adresu SK07@faro.it.