






IRIX 70, IRIX 708, NOVELIX 6510 a ORAMATIC 558:

Pokyny pro uživatele k určení, zda byl produkt vyroben od listopadu 1990 do listopadu 1994, a v případě, že ano, zda byla provedena povinná úprava.


Způsob zjištění data výroby

				
1985	1987	1989	listopad 1990 > září 1997	září 1997


Zde je uvedeno sériové číslo viditelné na generátorech vyrobených od listopadu 1990 do prosince 1991:

Typ generátoru	Zahájení výroby	Konec výroby
Irix 558	Od listopadu 90 (EO3137)	Do konce listopadu 92 (EO3447)
Irix 708	Od listopadu 90 (G8665)	Do konce listopadu 92 (G20315)
Oramatic 708	Od listopadu 90 (105560)	Do konce listopadu 92 (113065)
Oramatic 558	Od listopadu 90 (J7578)	Do konce listopadu 92 (J8734)
Irix 70		Do konce srpna 97


V lednu 1992 byla prováděna identifikace (2 písmena) na šedém krytu buď na pravé, nebo na levé straně (viz obr. 2). Tato písmena byla vyznačena značkovačem nebo razítkem, případně razídkem, které bylo rozšířeno ve slévárně. Chcete-li tato písmena přečíst, sejměte bílý plastový kryt tak, že odstraníte jeden šedý kovový díl a vysunete jej dozadu.

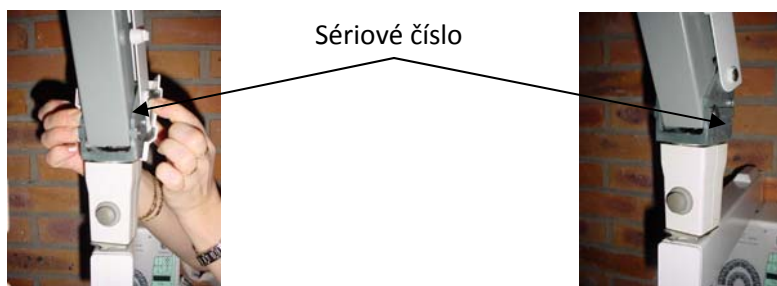

Obr. 2
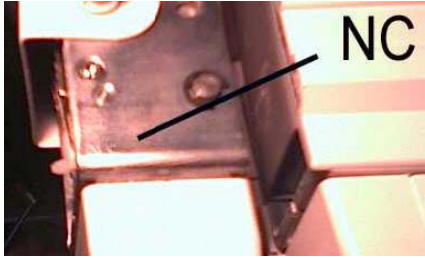
<p>Význam 2 písmen je například následující: GK = listopad 1992 ID = duben 1994 LI = září 1997</p>		<table border="1"> <tr><td>G</td><td>1992</td><td>A</td><td>Leden</td></tr> <tr><td>H</td><td>1993</td><td>B</td><td>Únor</td></tr> <tr><td>I</td><td>1994</td><td>C</td><td>Březen</td></tr> <tr><td>J</td><td>1995</td><td>D</td><td>Duben</td></tr> <tr><td>K</td><td>1996</td><td>E</td><td>Květen</td></tr> <tr><td>L</td><td>1997</td><td>F</td><td>Červen</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>G</td><td>Červenec</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>H</td><td>Srpen</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>I</td><td>Září</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>J</td><td>Říjen</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>K</td><td>Listopad</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>L</td><td>Prosinec</td></tr> </table>		G	1992	A	Leden	H	1993	B	Únor	I	1994	C	Březen	J	1995	D	Duben	K	1996	E	Květen	L	1997	F	Červen			G	Červenec			H	Srpen			I	Září			J	Říjen			K	Listopad			L	Prosinec
G	1992	A	Leden																																																
H	1993	B	Únor																																																
I	1994	C	Březen																																																
J	1995	D	Duben																																																
K	1996	E	Květen																																																
L	1997	F	Červen																																																
		G	Červenec																																																
		H	Srpen																																																
		I	Září																																																
		J	Říjen																																																
		K	Listopad																																																
		L	Prosinec																																																
																																																			

Způsob kontroly, zda byla provedena úprava

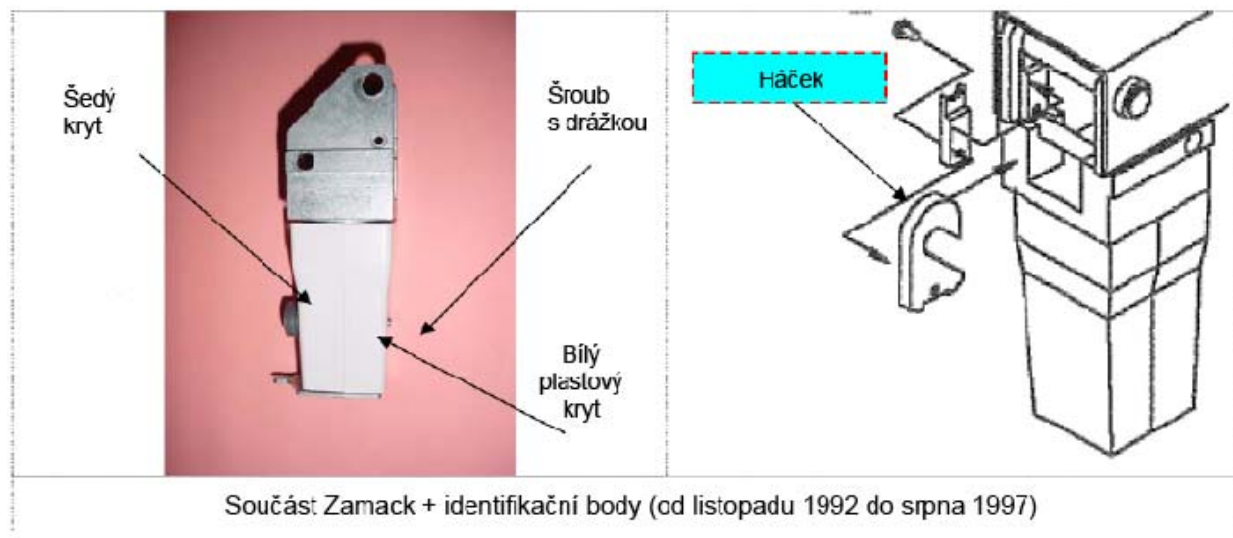

Pokud chybí háček, znamená to, že úprava nebyla provedena. V případě potíží se obraťte na společnost Carestream Dental, požádejte o provedení kontroly prodejce nebo společnost Carestream Dental.

Kontakt pro veškeré informace týkající se tohoto oznámení:

Tým technické podpory společnosti Carestream Dental:

E-mail: europedental@carestream.com

Tel.: 00 800 3456 6543