

Naléhavé bezpečnostní upozornění pro terén

Becton, Dickinson UK Limited: BD Plastipak™ 50ml LuerLok Syringe

Vážený zákazníku,

tímto Vás informujeme, že Kimal Plc obdržel naléhavé bezpečnostní upozornění pro terén od Becton, Dickinson UK Limited, týkající se jejich **stříkačky BD Plastipak 50ml LuerLok (kód produktu 300865)**.

BD stahuje stříkačky, které mohou potenciálně způsobit únik tekutiny přes píst stříkačky v důsledku zubu- vrubu na stěně stříkačky.

Produkty, kterých se toto opatření týká, jsou uvedeny v následující tabulce.

Kód produktu	Číslo lota
300865	1303289
300865	1303294
300865	1303297
300865	1303299
300865	1303300
300865	1303301
300865	1303302
300865	1303303
300865	1304202
300865	1304206
300865	1304211
300865	1304213
300865	1304217
300865	1304219
300865	1304223
300865	1304227
300865	1304228
300865	1304238

Poznámka: Toto oznámení se liší od oznámení o stříkačce Plastipak Luer-Lok (Kód produktu 300865), které bylo zahájeno BD v dubnu 2013.

Naše záznamy ukazují, že Kimal dodal na Vaše pracoviště výše uvedený produkt jako samostatný sterilní kus nebo již zahrnutý v Kimal hotovém výrobku. Dovolujeme si Vás proto upozornit na **následující pokyny**:

1. Předejte, prosím, všechny tyto informace každému, kdo používá nebo objednává stříkačky BD Plastipak 50 ml Luer-Lok ve Vaší instituci. Navíc se ujistěte, že kopie tohoto dopisu je poskytována jiným organizacím, kterým byl poškozený produkt předán.
2. Zkontrolujte Vaše zásoby stříkaček BD Plastipak REF 300865 s čísly šarží, které jsou vypsány ve výše uvedené tabulce. Produkt vraťte Vašemu distributorovi.
3. **Vyplňte, prosím, níže uvedený formulář (Dodatek 1) a zašlete na mailovou adresu: hana.kovalova@bmgrp.cz nebo faxem: +420 545 573 242.**
4. Nepoužívejte dodaný výrobek Kimal číslo produktu 300865, dotčený nápravným opatřením.(místo toho použít.?) Náhradní stříkačky obdržíte neprodleně od distributora.
5. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto sdělení, obraťte se na Vašeho distributora.

Přijměte, prosím, naši omluvu za způsobené nepříjemnosti způsobené tímto oznámením. Děkujeme, že nám pomáháte poskytovat vynikající kvalitu produktů a služeb pro naše zákazníky a jejich pacienty.

S pozdravem

Hana Kovalová

Distributor:

Biomedica ČS, s.r.o.
Sokolovská 100/94, Meteor B,
186 00 Praha 8 Karlín

Dodatek 1

Formulář pro náhradu vadných stříkaček BD 50 ml

BD Plastipak TM 50 ml Luer Lock Syringes Reference Numbers: 300865

Prosím, vyplňte následující formulář dle níže uvedené tabulky.

- Nemáme žádný z výše uvedených produktů na skladě
- Máme na skladě následující produkty (z výše uvedené tabulky)

REF	Číslo šarže	Počet kusů

Vaše kontaktní adresa:

Odpovědná osoba:

Podpis:

Razítko:

Dne:

