



AMO Ireland  
Block B  
Liffey Valley Office Campus  
Quarryvale, Co. Dublin  
Ireland

**UPOZORNĚNÍ**  
**Laserový systém Abbott Medical Optics (AMO) STAR Excimer**  
**Modely S2, S3, S4 a S4 IR**

October 8th, 2013

Vážený uživateli laseru STAR Excimer,

Společnost Abbott Medical Optics (AMO) zasílá toto upozornění všem zákazníkům, kteří používají laserové systémy AMO STAR S2, S3, S4 a S4 IR Excimer, aby Vás upozornila na problém, který může vést k výpadku osvětlení v důsledku nečekaného selhání komponenty při vysoce zatěžujícím používání šikmé a prstencové osvětlovací lampy. Tento problém byl vysledován ke konkrétní komponentě, která je používána v omezeném počtu systémů STAR.


Vzhledem k setrvalému úsilí společnosti AMO o zachování bezpečnosti Vám v případě zjištění, že Váš systém tuto komponentu obsahuje, při nejbližší servisní návštěvě ve Vašem laseru bezplatně vyměníme desku s tištěnými elektrickými obvody. V nepravděpodobném případě, že u systému STAR dojde k výpadku jak šikmého, tak prstencového osvětlení, požádejte o pomoc servisního zástupce společnosti AMO. Společnost AMO doporučuje používat během léčby pacienta nejnižší úroveň osvětlení, aby se snížila zátěž způsobená současným používáním šikmé a prstencové osvětlovací lampy. Doporučuje se používat pouze dvě šikmé lampy (neaktivovat volitelnou třetí šikmou lampu), aby se ještě dále snížila nepravděpodobná možnost kompletního výpadku osvětlení.

Pro každého chirurga na Vašem pracovišti vyplňte a vraťte přiložený formulář společnosti AMO faxem na číslo +353 1 675 4691 do 3 nejbližších pracovních dnů. Tento fax potvrdí:

- Přijetí tohoto upozornění
- Porozumění informacím v tomto dopisu

Informujte o tomto upozornění a obsažených informacích Váš personál. Společnost AMO oceňuje pozornost, kterou věnujete této záležitosti, a omlouvá se za nepříjemnosti, které Vám tímto případně mohou vzniknout. Společnost AMO je odhodlána poskytovat Vám nejmodernější technologie, které Vám umožní provádět nejbezpečnější a nejúčinnější laserové korekce zraku. S tímto cílem neustále vylepšujeme naše technologie a usilujeme o to, aby vždy odpovídaly standardům nejvyšší kvality. Velice si ceníme Vaší spolupráce při tomto úsilí!

Jestliže máte jakékoliv otázky týkající se provozu laserového systému STAR Excimer nebo požadavky ohledně dokumentace související s tímto dopisem, zavolejte prosím +353 1 643 6246, kde budete přeměrováni k zástupci společnosti, který Vám rád pomůže.

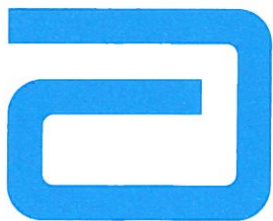


AMO Ireland  
Block B  
Liffey Valley Office Campus  
Quarryvale, Co. Dublin  
Ireland

Děkujeme Vám!

*Michelle Hall*

Michelle Hall  
Vigilance Specialist  
Abbott Medical Optics Inc.

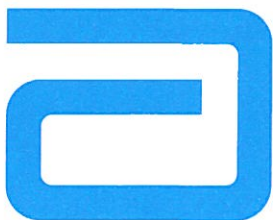

AMO Ireland  
Block B  
Liffey Valley Office Campus  
Quarryvale, Co. Dublin  
Ireland

**Potvrzení o přijetí upozornění ohledně  
laserového systému Star  
Potenciální výpadek osvětlení: 347118  
Informace o pracovišti – POVINNÉ**

Výrobní číslo systému Star: \_\_\_\_\_

Název zákazníka: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Město, PSČ: \_\_\_\_\_

Stát: \_\_\_\_\_

Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o potenciálním výpadku osvětlení  
Upozornění týkající se systémů STAR S2, S3, S4 a S4 IR.

1	Jméno lékaře: <b>TISKACÍM</b> Podpis lékaře:		6	Jméno lékaře: <b>TISKACÍM</b> Podpis lékaře:	
	Datum podpisu:			Datum podpisu:	
2	Jméno lékaře: <b>TISKACÍM</b> Podpis lékaře:		7	Jméno lékaře: <b>TISKACÍM</b> Podpis lékaře:	
	Datum podpisu:			Datum podpisu:	
3	Jméno lékaře: <b>TISKACÍM</b> Podpis lékaře:		8	Jméno lékaře: <b>TISKACÍM</b> Podpis lékaře:	
	Datum podpisu:			Datum podpisu:	
4	Jméno lékaře: <b>TISKACÍM</b> Jméno lékaře Podpis:		9	Jméno lékaře: <b>TISKACÍM</b> Jméno lékaře Podpis:	
	Datum podpisu:			Datum podpisu:	
5	Jméno lékaře: <b>TISKACÍM</b> Podpis lékaře:		10	Jméno lékaře: <b>TISKACÍM</b> Podpis lékaře:	
	Datum podpisu:			Datum podpisu:	

Prosíme, po vyplnění odešlete toto potvrzení faxem společnosti AMO do TŘÍ  
pracovních dnů.

+353 1 675 4691

FSN2013-32\_CS